

Babycare TENS[®]



SENSATONE



Innehåll

1. Typer av inkontinens

2. Modes för SensaTONE

3. Display olika lägen

4. Typer av Prob

5. TENS jämfört med konventionell inkontinens behandling

6. Vad ingår vid leverans?

7. Varför arbeta med Body Clock & DOIC?

1. Typ av Inkontinens



Typ	Definition	Impact
Urin inkontinens	Ofrivillig förlust av urin	Påverkar 25% av vuxna med vikten på kvinnor.
Fekalier inkontinens	Ofrivillig förlust av fekalier	Påverkar 6% av vuxen population
Nattlig Sängvätning	Ofrivillig förlust av urin under sömn.	Påverkar 1 – 2% av vuxen population

- Inkontinens problem är mer utbredd än det vanligen uppfattas som.
- SensaTone ger en diskret lösning genom att stärka bäckenbotten muskler naturligt. Detta införskaffas genom en stegvis träning av olika elektriska pulser. Varaktighet och intensitet av programmen möjliggör en enkelhet. Muskelns kapacitet kan successivt öka med tränings rutiner. Detta ger en anpassad nivå för att förbättra de vanligaste förekomsten av inkontinens.
- SensaTone undviker behovet av kirurgiskt ingrepp.


2. Modes för Sensatone



Mode	Program	Symptom	Tid	Behandlings effekt
A	Tvingande	Stark, plötslig okontrollerbar tvingande att urinera.	30 min	Förbättras genom reducering av falska signaler skickat från blåsan till hjärnan. Resultat kan påvisas inom 14 dagar.
B	Stress	Litet läckage av urin orsakat av nysning, hosta, skratt eller övning.	30 min	Bygger muskelfibrer och nervkänslighet. Synligt resultat kan påvisas inom 2 månader.
C	Mixed	Kombination av tvingande och stress.	45 min	Kombinerad lösning för mode A och B. Märkbar förbättring kan påvisas inom inom 14 dagar.
D	Efter Vård	Sekundär behandling	Not set	Kan användas direkt efter en av ovan nämnda behandlingar eller som en förebyggande mode efter noterad förbättring.

3. Display of Modes

Controls on the SensaTONE

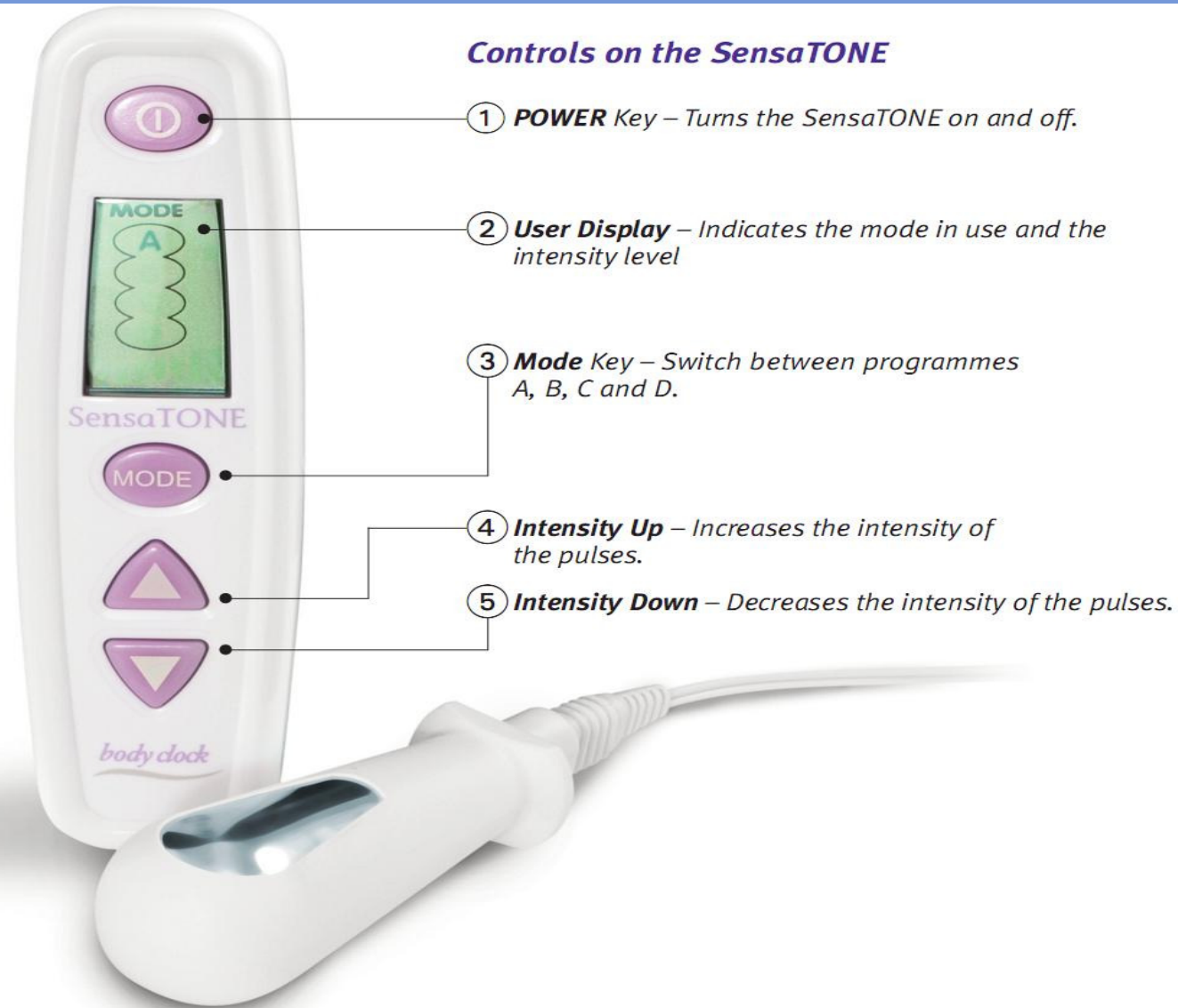


4. Typer av olika prober

SensaTone levereras med en standard sond för urininkontinens. För andra former av inkontinens såsom fekalier inkontinens finns analprobe (nederst till vänster) tillgänglig.



5.TENS jämfört med konventionell inkontinens behandling

TENS	Medicinering / Kirurgi
Effektiv genom naturliga utövandet av specifika muskler.	Kirurgiska ingrepp och läkemedelsbehandling skapar mycket bieffekter Mer påträngande för patienten.
Man kan själv sköta behandlingen	
Mindre invasivt	

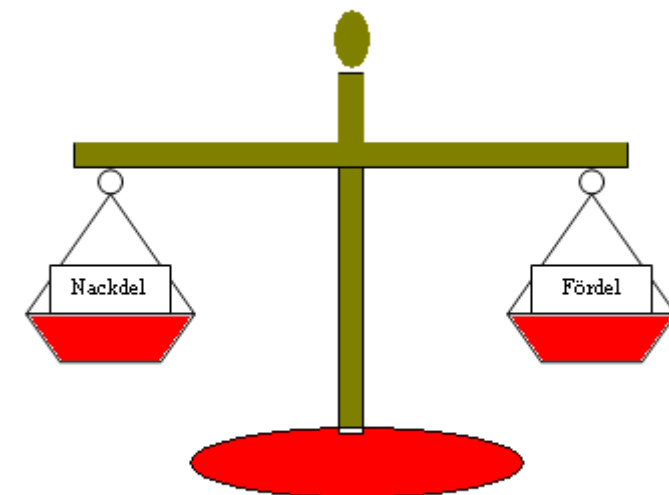

6. Vad ingår vid leverans ?

- ✓ 1 x SensaTone enhet
- ✓ 1 x kabel
- ✓ 1 x förpackning med smörjande gel
- ✓ 2 x AAA batterier
- ✓ Instruktionsbok
- ✓ Mjuk väska
- ✓ 1 x Hals rem



7. Varför arbeta med Body Clock & DOIC?

- God renommé – Försäljning sedan 1989
- Etablerad tillverkare av PFS, TENS och EMS-enheter
- Mest kostnadseffektiv fristående specialiserad PFS enhet på marknaden.
- Rekommenderad och professionella.

