


Välja rätt lyftsele

Huvudsyftet med denna guide är fungera som stöd vid val av lyftsele som **ger optimalt stöd**.

Invacare **Slings** är designade för att stödja de delar av kroppen där muskeltonus och kroppskontroll är påverkade. De huvudsakliga kroppsfunctionerna som behöver riskvärderas är ben, höft, bål och huvudkontroll. Följande tabell ger en översikt över vilken modell av lyftsele som kan vara aktuell beroende på brukarens fysiska förmåga.

Kroppskontroll bedömning ▾

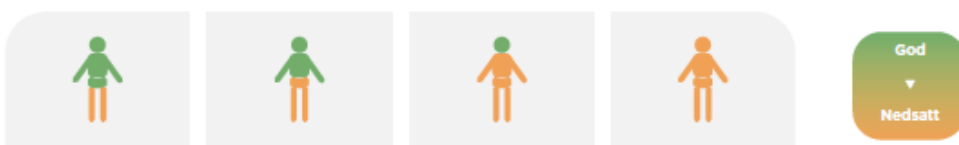

Kroppsstöd från olika modeller av **Invacare Slings** ▾

Mycket lätt ▾	Lätt ▾	Medium ▾	Fullt ▾	Avsedd Användning
	Universal Low	Universal Standard	Universal High	Universal Standard
		Universal High Plus		Mindre optimalt*
		Amputees		Optimalt
		Easy-Fit		
		Comfort Standard		
		Comfort In Situ		
			Comfort High	
Dress Tolleting Low				
Dress Tolleting High				
Light Transfer Support				
Standing Transfer Vest				
Standing Transfer Vest with Groin band				
Stand Assist				
Transfer Stand Assist				

*Mindre optimalt
Det är viktigt att tänka på att brukaren vid valet av sele har större fysisk förmåga än vad lyftselen tillåter. Det finns därför risk att detta bidrar till onödig passivitet och immobilisering. Dessutom används mer material än nödvändigt, vilket gör det onödigt svårt att applicera lyftselen.

Välja rätt storlek

Höftbredd och rygghöjd mätt i sittande är de viktigaste måtten för att välja rätt storlek. För selar med bälten behöver man även ta hänsyn till midjemåttet.

Brukarens vikt bör beaktas med avseende på selens maxbelastning. Det går dock inte att bestämma selens storlek enbart baserat på vikten.

I Invacare Selection Guide finns en mer ingående översikt över mått per modell och storlek.



► Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL
► SWL	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	250 kg	300 kg



◀ Universal Standard

- Stödjer hela kroppen inklusive axlarna
- För brukare med god huvudkontroll
- Används vid förflyttning från liggande, lyft från golv förutsatt att brukaren har god huvudkontroll och från sittande till sittande

Storlekar & Material ▾

▼ Familj	▼ Modell	▼ Storlek						▼ Material		
		XS	S	M	L	XL	XXL	Polyester	Nät	Spacer
	Universal Standard		◆	◆	◆			●	●	●

Material ▾



Hel Polyester

- ▲ Standardmaterial som är enkelt att arbeta med - glider lätt och torkar snabbt efter tvätt.



Nät

- ▲ Praktiskt att använda vid bad och dusch, släpper igenom vatten och torkar snabbt.



Spacer

- ▲ Elastiskt material som formar sig efter brukarens kropp vilket ger ytterligare komfort och stöd. Lämpat för brukare med känslig hud.

Tekniska data ▾

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se



Max brukarvikt ▾



Max tvätttemperatur



Blek ej ▾



Torktumling ▾

Invacare
Slings

XS, S, M, L = 200 kg
XL = 250 kg
XXL = 300 kg

90° C

Låg temperatur

Alla lyftselar ska provas ut och anpassas för den enskilde brukaren för att garantera optimal komfort och säkerhet. En riskbedömning måste genomföras innan lyftselen används tillsammans med en lyft från annan tillverkare.